










Laboratoire
BIOGROUP
biologie médicale
CBM25

Mode opératoire : utilisation des sachets pour pré- lèvements externes

C-PRA-M100-01-
Version 1

1	Vérifier la validité du sachet : présence d'une date de péremption. Au-delà de cette date, retourner le sachet au laboratoire	
2	Ouverture du sachet : déchirer l'étiquette comportant la date de péremption	
3	Vider l'ensemble des éléments contenus dans le sachet	
4	Réaliser le prélèvement	
5	Remettre les tubes prélevés correctement identifiés et tubes non prélevés dans le sachet	
6	Refermer le sachet en retirant le film de protection de la bande adhésive en haut du sachet	
7	Glisser tous les documents utiles dans la poche située sur le devant du sachet (fiche de renseignements, ordonnance...)	
Cas particulier : gestion des urgences		
	Les prélèvements urgents seront distingués par la présence d'un sachet jaune : Mettre le sachet fermé dans un sachet grand format jaune fourni par le laboratoire	



Laboratoire
CBM25

**Mode opératoire : utilisation
des sachets pour pré-
lèvements externes**

C-PRA-M100-01-
Version 1

Mettre l'ensemble dans une Box'air
Traitement plus rapide au laboratoire.
*En cas d'urgence vitale, transmettre le
prélèvement dans les meilleurs délais*



La version électronique fait foi